


# 床位分机

—— 产品安装使用说明 ——

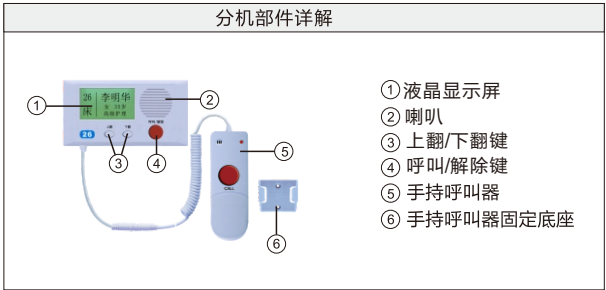



一、安装调试：

1、背面接口说明：

(1) 总线接口：

将分机的白、黑、黄三芯线并联到一条三芯总线上后，再与模数转换器的“接分机1、2、3接线柱”对应相连。

(2) 门灯接口：

将分机的黄、红、黑三芯引线分别对应接在门灯的黄红黑(NBW-ME)或红白黑(NBW-ME5)上。

(3) 扩展接口：

将按钮接线盒（AN-K）的电源、信号、地线分别对应接在分机的黄、红、黑三芯引线上，按钮接线盒的5组2芯引线可外接5个防水按钮。

注：为了提高系统稳定性和抗干扰能力，建议模数转换器到分机端的总线采用三芯屏蔽线。线材耐温需在105℃。

分机安装完毕后，要将总线屏蔽层全部连通，中间不要出现断层，并将屏蔽层头或尾接大地。

二、设置调试：

分机使用前需先按对应床号编辑分机地址。

例：将分机编码成5号分机

将分机与模数转换器接好线后，通电后进入开机自检状态。待自检完毕，点击主机（或病房门口机）上的“系统设置”菜单，选择“在线分机编码设置”项，准备给分机编码。请按住分机面板上的“呼叫/解除”键至呼叫指示灯常亮，再松开；此时主机上会收到分机编码请求（左下角出现红色闪烁），然后选择5路路选分机键按下，当主机提示“已对码”，红色闪烁消失，即编码成功。按上述方法将所有分机依次编码。

当编完分机号码后，按分机的“呼叫/解除”键呼叫主机，以确认分机的编号。

三、使用说明：

1、分机呼叫主机及对讲：

按下分机面板上的“呼叫/解除”键或按手持呼叫器上的“CALL”键，分机屏上会显示"呼叫中..."，主机上相应的路选分机键和该病房门口机上相应的病床号同时呈红色闪亮，并伴有语音播，同时该病房门外的门灯亮；待主机选定该路后，方可以免提、手柄二种方式与分机双工对讲，或以TALK键与分机双向对讲（按下TALK键可讲话，松开TALK键可听分机讲话）。

注：如主机呼叫该分机，分机屏上会显示"通话中..."，可与主机双向对讲。

2、解除呼叫：

分机或手持呼叫器如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下“呼叫/解除”键。

3、信息查询：

待机时，可显示病人信息，并可按“上翻”或“下翻”翻看病人信息。