

4、治疗信息：可查看关于用户的相关数据。

5、费用信息：按下进入界面后，分机会查询用户使用药品的费用信息，查询需要一定时间。

6、护理计时：短按使分机进入护理状态，主机端有提示，分机主界面显示护理中，分机连接的门灯会切换颜色。长按可查询分机的相关软件版本信息与重启分机的功能。

床位分机

产品安装使用说明





一、背面接口说明：

1、总线接口：

(1) 与模拟门口机 (NBN-BM) 的连接时：将分机背后的 1、2、3 三芯线对应并联到模拟病房门口机的接分机 (1、2、3) 总线上。

(2) 与模数病房门口机 (NN-B10B/NN-B10A) 的连接时：将分机背后的 1、2、3 三芯线对应并联到模数病房门口机的1、2、3总线上。

(3) 与模数转换器 (NNV-AD) 连接时：将分机背面的 1、2、3 三芯线对应并联到模数转换器的1、2、3总线上

2、门灯接口：将分机的红（门灯电源）、白（门灯控制）、黑三芯引线对应与门灯上的黄、红、黑三芯引线相连。


3、外接输出接口：当另购了灯光控制盒或按钮接线盒时，将分机的红（门灯电源）、棕（扩展总线）、黑（地线）三芯引线与另购设备的电源、信号、地接线柱相连。

(1) 另配灯光控制盒时，有2组开关量输出端口，可分别接床头灯、照明灯，共2盏灯的开关控制。以“开关量输出1”为例，将床头灯（或照明灯）的两条线分别与开关量输出1、220V市电的任意一条线连接；220V市电的另一条线与开关量输出1的另一接口连接。


(2) 另配按钮接线盒时，有5组按钮接口，可实现外接5个防水按钮（型号：ANW3）。地线+按钮1为一组按钮接口，以此类推。

注：为了提高系统稳定性和抗干扰能力，建议模数主机到分机端(或病房门口机到分机端)的总线采用三芯屏蔽线，屏幕线接线要求：A、总线屏蔽层全部连通，不能出现断层；B、整条线屏蔽层头和尾必须要接大地。

如无法满足上述屏蔽层接线要求，线缆只能选择非屏蔽线。

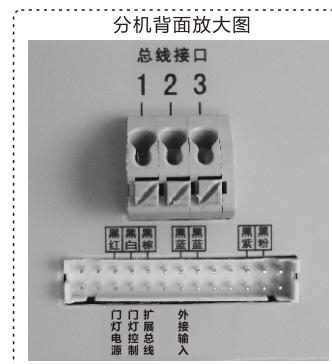

二、安装底盒预装墙面示意图：

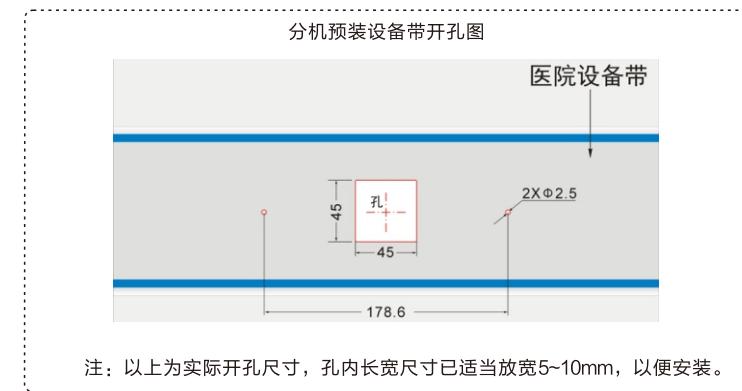

三、基本设置：

例：将分机编码成5号分机

将一台分机或多台分机与模数主机（或病房门口机）相连后，通电后进入开机自检状态。待自检完毕，点击主机（或病房门口机）上的“系统设置”菜单，选择“在线分机编码设置”项，准备给分机编码。请按住分机的“呼叫/解除”键5秒后再松开；此时主机（或病房门口机）会收到分机编码请求（左下角出现红色闪烁），然后选择5号路选分机键按下，当主机提示“已对码”，红色闪烁消失，即编码成功。

按上述方法将所有分机依次编码。当编完分机号码后，按分机的“呼叫/解除”键呼叫主机，以确认分机的编号。

四、使用说明：

1、分机呼叫及对讲：按下分机面板上的“呼叫/解除”键或手持呼叫器上的“CALL”键，分机屏上显示“呼叫中...”，主机上相应的路选分机键和该模数病房门口机上相应的病床号同时呈红色闪亮，并伴有语音播报，同时该病房门外的门灯亮；待主机选定该路后，分机屏上会显示“通话中...”，主机方可以免提、手柄两种方式与分机双工对讲，或以TALK键与分机双向对讲（按下TALK键可讲话，松开TALK键可听分机讲话）。

注：如主机主动选分机，分机屏上显示“通话中...”，可与主机双向对讲。

2、解除呼叫：分机或手持呼叫器如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下“呼叫/解除”键。

3、护理增援：分机液晶屏上有“请求增援”选项，对应按下方按键，主机上相应的路选分机键呈黄色闪亮，按键上显示“请求增援”，并语音播报“XX号房 XX号床 请求增援”，同时该病房门外的门灯亮，以提示需要增援；并在主机上显示“请求增援”；如需对讲，可点击主机上的相应路选分机键与之对讲。