

床位分机

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司



一、安装调试

1、产品安装图：

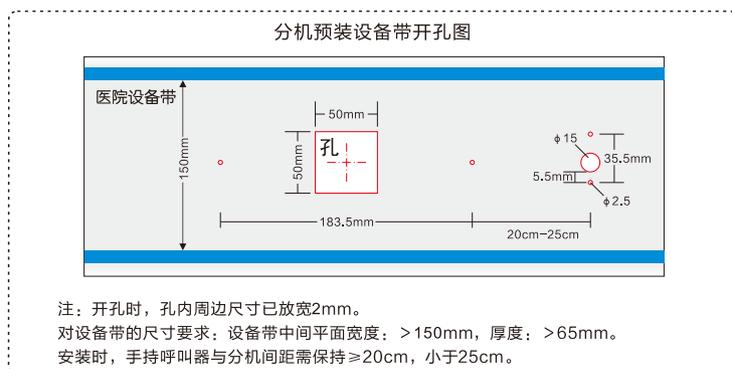

2、背面接口说明：


(1) 总线接口：

- ① 与模拟门口机(NBN-BM)连接时：将分机背后的1、2、3接口对应并联到模拟病房门口机的接分机1、2、3总线上。
- ② 与模数病房门口机(NN-B10A/B10B)连接时：将分机背后的1、2、3接口对应并联到模数门口机的1、2、3总线上。
- ③ 与模数转换器(NNV-AD)连接时：将分机背后的1、2、3接口对应并联到模数转换器的接分机的1、2、3总线上。

(2) **门灯接口：**将分机的门灯电源、门灯控制、地线分别对应接在门灯的黄红黑(NBW-ME)或红白黑(NBW-ME5)。

(3) **扩展接口：**将按钮接线盒(AN-K)的电源、信号、地线先分别对应接在分机的扩展电源、扩展总线、地线上；再将ANW4按钮的白、黑两根线不分极性的接到按钮接线盒(AN-K)的信号、地线上，红色线不接，或将ANW3按钮的2芯线不分极性接到按钮接线盒(AN-K)的信号、地线上。

(4) **手持接口：**将手持线上的端子与“外接手持”接口连接，连接时需注意端子方向。连接后即可通过手持与主机进行呼叫对讲。

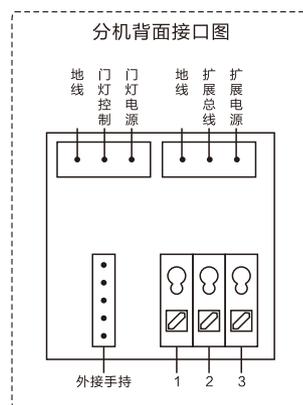

二、设置调试：

分机使用前需先按对应床号编辑分机地址。

例：将分机设置成5号分机。将设备通电后，主机需进入“系统设置”菜单，选择“编码设置”项，准备给分机编码。此时按住分机的“呼叫/解除”按键约5秒，此时主机将收到分机的编码请求，此时按下5号路选按键，当主机提示“已对码”，即编码成功。编码结束后，主机退出编码界面会再次对所有分机进行检测。

三、使用说明：

- 1、**呼叫护士：**手持和分机面板上都有呼叫护士的按键，方便患者使用。触发后即可呼叫到护士站主机，主机接听即可双向通话。
- 2、**解除呼叫：**手持或分机如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下分机面板上的“呼叫/取消”按键。
- 3、**换药提醒：**这是一个有针对性的报警提示，区别于呼叫。当触发“换药提醒”按键后，护士站主机将播报“xx床换药提醒”。听到播报后护士即知道这个床的患者需要换药。
- 4、**紧急增援：**这是一种高级别的呼叫，一般由医护人员使用。触发“请求增援”按键后，护士站主机将播报“xx床请求增援”，其他医护人员听到后需立即前往帮助。
- 5、**护理计时：**此功能由医护人员使用，触发时启动计时功能，再次触发结束计时功能，记录会保存至主机，并同步上传至服务器保存。
- 6、**费用查询：**信息来源同步HIS，患者可自行查询入院后的费用清单。
- 7、**更多信息：**可查看患者的详细信息，如病情、医嘱、分机主界面显示不下的扩展字段等。
- 8、**接收广播：**分机可接收护士站主机发布的MP3广播和喊话广播。
- 9、**电子床头卡功能：**分机屏幕具备电子床头卡功能，在屏幕上可以查看床号、患者信息、病情、医嘱、住院编号、护理标识等，所有信息来源于HIS，可根据数据库自动更新，无需手动维护。